


セット内容


【各部名称】

- 支持アーム・・・1個
- ボールヘッド・・・1個
- 取扱説明書(本紙)・・・1枚

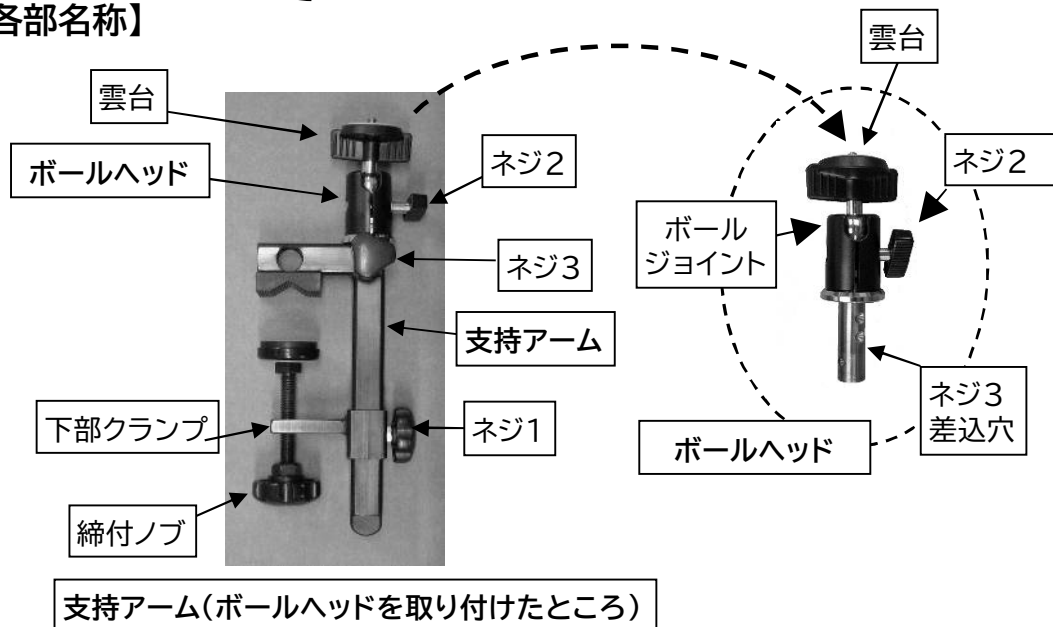


【1. 取付方法】

- (1) 固定する台やパイプに支持アーム本体を奥までしっかりとめ込み、「ネジ1」と「締付ノブ」を調整して固定する部分にクランプ全体をしっかりと固定します。やわらかい部位に挟むときは大きめの板と一緒に挟むなどで安定させてください。
- (2) ボールヘッド部の「ネジ2」を反時計方向に回し「雲台」のネジにファイン・チャットのネジ穴をあわせ、しっかりと取り付けます。
- (3) 「ネジ2」を時計方向に回してファイン・チャットを固定します。

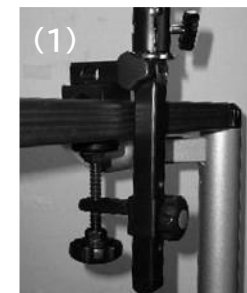

【2. ファイン・チャットの角度調整方法】


ファイン・チャットの角度を変えるときには「ネジ2」を反時計方向に回して少しゆるめて調整します。

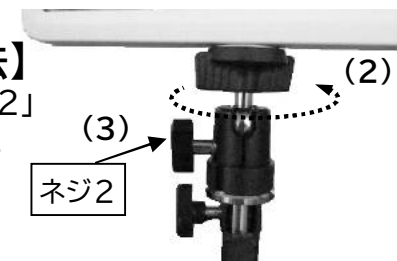

【3. ボールヘッドの差込位置の変更】

「ネジ3」を外すとボールヘッドを取り外せます。ボールヘッドは支持アームの合計5方向からの取り付けが可能です。一番使いやすい方向からボールヘッドを差込み、対応する部分に「ネジ3」を取り付け、ボールヘッドが抜けないようにしてください。

その後、改めて【1. 取付方法】に従い支持アーム全体をしっかりと取り付けます。これにより、支持アーム全体を水平な板やポールばかりではなく、垂直の板など、さまざまな方向に固定し、ボールヘッドの取り付け角度も自由に設定できます。

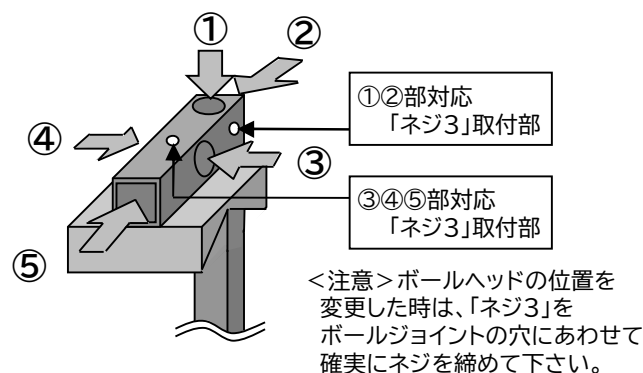

【ボールヘッドの差込場所】



【垂直なパイプへの取付例】



【垂直な壁の上部への取付例】

【ご注意】

- 支持アームは、安定した丈夫な台やパイプに取り付けて下さい。また、万一支持アームが外れたりしても安全な位置を選んで取り付けて下さい。
- 使用中は、常に各ネジの「ゆるみ」や「がたつき」を確認して頂き、事故には十分注意して下さい。
- 異常があればすぐに使用を中止して頂き、販売店に相談して下さい。
- ファイン・チャット以外を取り付けしないで下さい。
- 移動時は、支持アームよりファイン・チャットを取り外してから移動させて下さい。
- 本取扱説明書の指示以外の使用は絶対におやめ下さい。保証の対象外となります。

【製造・販売元】

アクセスエール株式会社
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6-22-301
TEL:072-646-7260 FAX:072-626-1113 E-mail:info@accessyell.co.jp

【保証書】

品名 支持アーム AYL-FCP001
保障期間 お買い上げ日 202 年 月 日 より1年
販売代理店印

※必ず販売代理店印をもらって下さい