


セット内容


フレキシブルアーム・・・1本
取扱説明書(本紙)・・・1枚

注意! 本製品をご利用頂くには、別途、支持アーム(AYL-FCP001)が必ず必要です。

【製品内容】

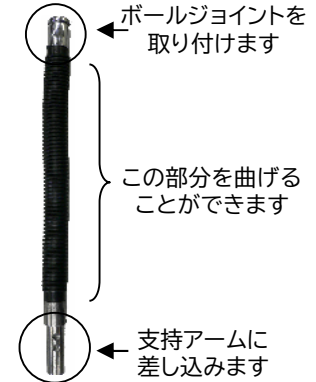

フレキシブルアーム

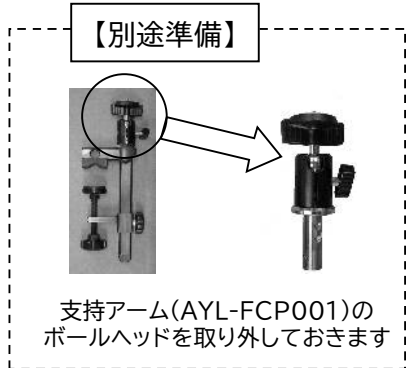

取付例

※「支持アーム」の取扱説明書も併せてご準備下さい。

【ご注意】

- 支持アームは、しっかりと固定できる台やパイプに取付けて下さい。
- フレキシブルアームを曲げる時はファイン・チャットを持たず、**フレキシブルアームの根本と先端を持ってゆっくりと曲げて下さい。**また、フレキシブルアームは曲げすぎないように、ご注意下さい。
- 特に車いすなど、移動や振動を伴う場所でのご利用時は、事故のないようご注意下さい。
- ファイン・チャット以外を取り付けしないで下さい。
- 本取扱説明書の指示以外の使用は絶対におやめ下さい。保証の対象外となります。


【製造・販売元】
アクセスエール株式会社
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6-22-301
TEL:072-646-7260 FAX:072-626-1113 E-mail:info@accessyell.co.jp

【保証書】
品名 フレキシブルアーム AYL-FCP002
保障期間 お買い上げ日 202 年 月 日 より1年

販売代理店印 ※必ず販売代理店印をもらって下さい。

【取付方法】

(1)支持アームの先端のボールジョイントを下図を参照しながら分解し、ボールジョイントをフレキシブルアームの先端に取り付けます。

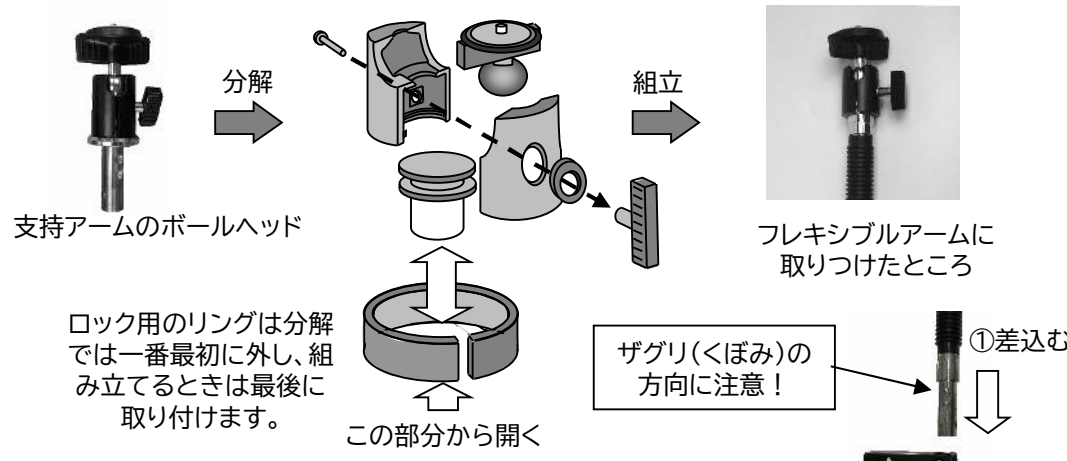

(2)支持アームのいずれかの差し込み口にフレキシブルアームの根本を差し込み、ザグリ(くぼみ)を図の方向にあわせてネジをしっかりと締めます。



(3)支持アームを台やパイプに取付けます。(支持アームの取扱説明書をご覧ください。)

(4)フレキシブルアームを、利用者の使いやすい方向へ曲げます。この時フレキシブルアームの根本と先端を持ってゆっくりと曲げて下さい。



(5)ボールヘッドにファイン・チャットを取り付けます。



(6)ファイン・チャットを見やすい方向に向けて、ボールジョイントのネジを時計方向に締め付けます。

【お願い】
フレキシブルアームを曲げる時は必ず支持アームの根本を持って曲げて下さい。また、支持アームを台やパイプに取りつけた時は、緩まないようにしっかりと取りつけて下さい。

