
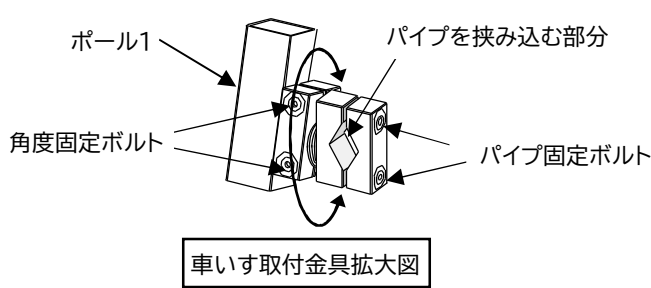


【内容物】


- 多機能アーム
- 六角レンチ
- 取扱説明書(本紙)

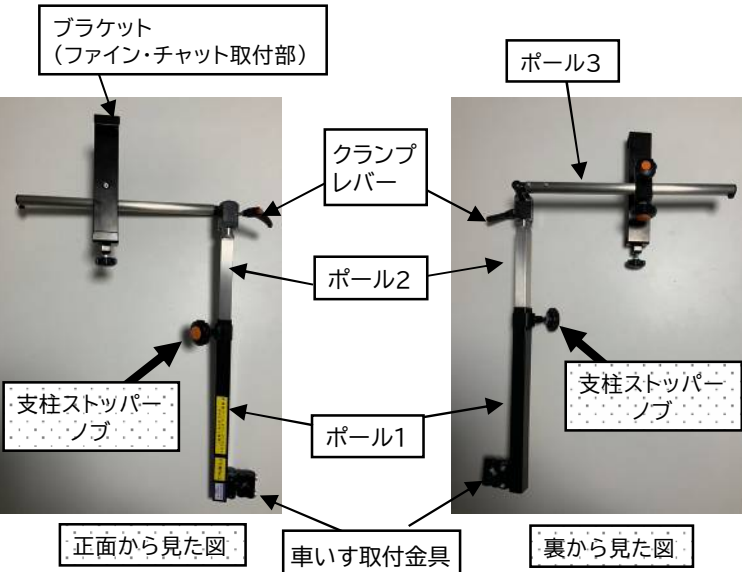

【取付方法】


1. パイプへの取付

2本のパイプ固定ボルトを緩めて(①)パイプを挟み込む部分を下図のように開きます。(②)固定するパイプを挟み、固定ボルトをしっかり締めこみます。(③)

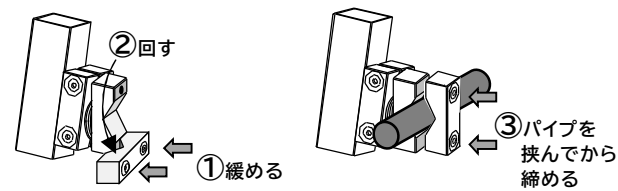

2. ポール1の角度調整

角度固定ボルトを少し緩めて(④)、ポール1の角度を使いやすい角度に調整してから(⑤)角度固定ボルトをしっかり締めこみます。(⑥)

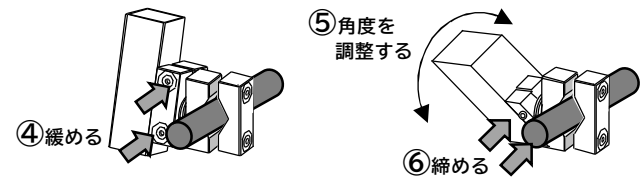


3. ポール2、3の調整

支柱ストッパーノブでポール2の長さを調整、クランプレバーでポール3の方向を調整してファイン・チャット固定用のブラケットが利用者の見やすい位置に来るように調整します。


4. ファイン・チャットの取付

ファイン・チャット取付金具の固定ネジを下にして、ファイン・チャット本体を横から入れる。

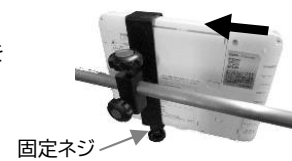

5. ファイン・チャット固定


ファイン・チャット取付金具の固定ネジを、ファイン・チャットの固定用ネジ穴に合わせ、時計回りに回してしっかりと固定する。

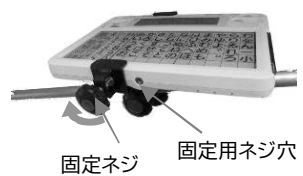

ボルトを締めるときは、付属の六角レンチを使用してください。

6. ファイン・チャットの角度調整

ファイン・チャットを手で支えながら⑦および⑧のネジを緩める事でファイン・チャット本体の角度を調整します。この2つのネジで、前後・左右、上下に微調整が可能なので、利用者が使いやすい角度に設定します。

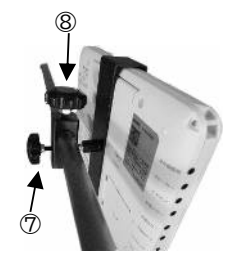

- ⑦: ファイン・チャット固定部を上下・左右に自由に角度が変えれます
- ⑧: ファイン・チャット固定部を左右にスライドできます

※ ⑦のネジをゆるめることなくファイン・チャット本体を無理に回したりすると多機能アーム及び本体を破損する恐れがあります。ファイン・チャットの位置を調整する際には必ず対応する部分のネジをゆるめてから調整して下さい。

【車椅子への設置例】 ※取付は別の製品の一例です



ステップ付近のフレームに取り付ける例

【設置時の工夫】 ※取付は別の製品の一例です



発送には十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、万一、付属物に不足がある、または、破損・汚損・故障などがある場合は、下記にご連絡ください。

【ご注意】
○本製品には弊社のファイン・チャット(AYL-FC01)以外を取り付けないでください。
○本取扱説明書に記載以外での使用は絶対にしていただきません。(保証対象外となります)

【製造・販売元】
アクセスエール株式会社
〒567-0032 大阪府茨木市西駅南町6-22-301
TEL:072-646-7260 FAX:072-626-1113
E-mail:info@accessyell.co.jp

【保証書】
品名 : 多機能アーム AYL-FCP003
保証期間 : お買い上げ日 年 月 日より 1年間

販売代理店印 ※必ず販売代理店印をもらってください。

くれぐれも事故のないことを
最優先にご使用願います

乗降りする時はクランプレバーを緩めることでポール3を上を持ち上げられます

クランプレバーは引いて回すことで90°づつ角度を変えられます