

【内容物】


・T型支柱(黒).....1	・ボルト.....3
・I型支柱(黒).....1	(長×2、短×1)
・上下可動支柱(銀).....1	・平ワッシャー.....3
・丸パイプ(銀).....1	・スプリングワッシャー.....3
・ファイン・チャット取付金具.....1	・六角レンチ.....1
	・取扱説明書(本紙).....1

【組立完成図】



【組立方法】

下図を参照し、①②の順番に組み立てる。

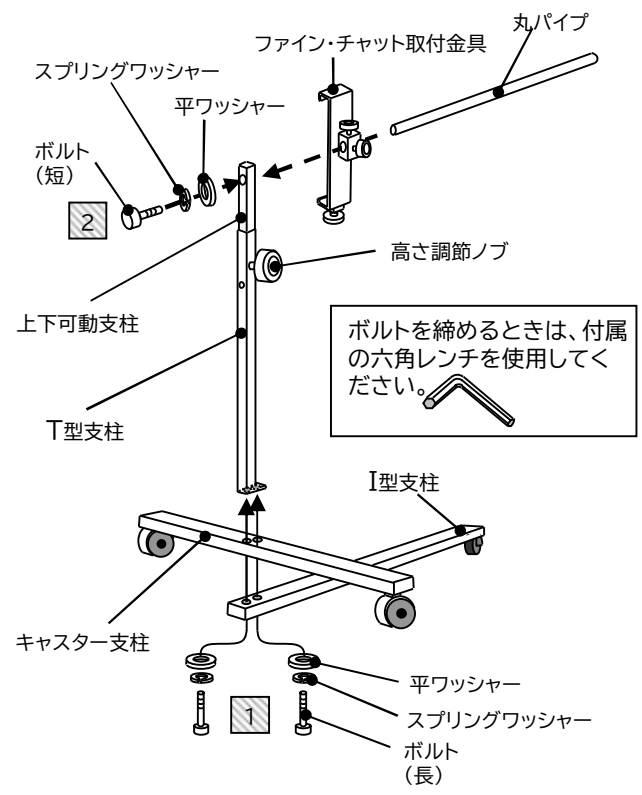

【ファイン・チャット取付方法】


1. ファイン・チャット取付金具の固定ネジを下にして、ファイン・チャット本体を横から入れる。
2. ファイン・チャット取付金具の固定ネジを、ファイン・チャットの固定用ネジ穴に合わせ、時計回りに回してしっかりと固定する。



【設置位置の調整】


■キャスターの固定

スタンドアーム全体を、利用者の見やすい位置に設置し、スタンドアームのキャスター(タイヤ)のストッパーを右図のように押して固定する。

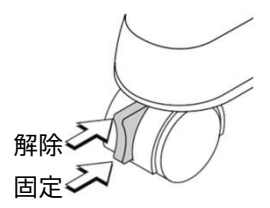

■高さの調整


高さ調節ノブをゆるめて上下可動支柱を上下させ、適切な高さを決める。上下可動支柱の穴をT型支柱の穴と合わせてから、高さ調節ノブをしっかりと締めて固定する。

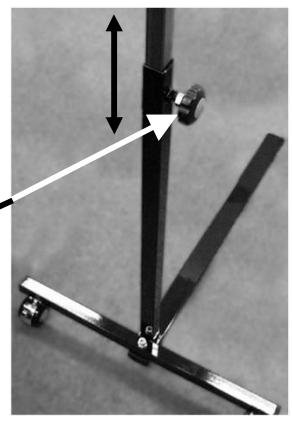

！注意！
ファイン・チャット本体が下がらないように、必ず「高さ調節ネジ」を上下可動支柱の側面の穴に合わせてしっかりと締めてください。上下可動支柱の穴にあわせてあれば、高さ調整ノブは最後まで締め込むことができます。

■ファイン・チャットの角度調整

ファイン・チャット取付金具の調整ネジ
①または②を反時計回りに回してゆるめ、ファイン・チャット本体を動かして、利用者の使いやすい角度に調整する。そのあと、調整ネジを時計回りに回し、しっかりと締める。
調整ネジ①：ファイン・チャット取付金具を左右にスライドする
調整ネジ②：ファイン・チャット本体を上下・左右に調整する

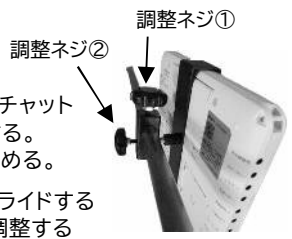

！注意！
必ず対応する部分の調整ネジをゆるめてから調整してください。無理に動かすと、ファイン・チャット本体やスタンドアームの破損、故障の原因となります。

■上下可動支柱の事故防止のために

T型支柱から上下可動支柱を抜くと、下端に半透明のゴムがあります。これは上下可動支柱が簡単に滑らないようにするためのブレーキの役割をしています。この部分の六角ボルトを締めこむことで、ゴムが縮んで太り、上下可動支柱を動かすとき、摩擦でブレーキとなります。上下可動支柱とT型支柱の抵抗が落ちてきたら、六角ボルトを少しづつ締めて、T型支柱と上下可動支柱の間に適度な抵抗を持たせてください。



発送には十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、万一、付属物に不足がある、または、破損・汚損・故障などがある場合は、下記にご連絡ください。

【ご注意】
○本製品には弊社のファイン・チャット(AYL-FC01)以外を取り付けしないでください。
○本取扱説明書に記載以外での使用は絶対にしないでください。(保証対象外となります)

【製造・販売元】
アクセスエール株式会社
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6-22-301
TEL:072-646-7260 FAX:072-626-1113
E-mail:info@accessyell.co.jp

【保証書】
品名 :スタンドアーム AYL-FCP004
保証期間 :お買い上げ日 年 月 日より 1年間

販売代理店印 ※必ず販売代理店印をもらってください。

くれぐれも事故のないことを
最優先にご使用願います