

セット内容

- 送信器本体 ……1台
(固定用ブラケット付き)
- 接続ケーブル ……1本
- 取扱説明書(本紙) ……1枚



ファイン・チャットへの取付方法


<ご注意> 緑のシールは剥がさないでください



(1) 上記点線の枠に取り付けます



(2) ファインチャットのブラケットの凹み部分が本体のツメのを上下から挟むようにして重ねます

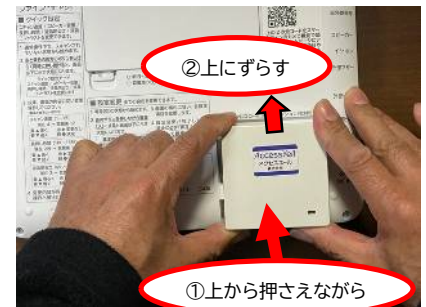

(3) 送信器を押さえながら上に押し上げることでブラケットをファイン・チャットに固定します



(4) 付属のモノラルケーブルで送信器の左側面とファイン・チャットの「外部ブザー」に接続します



(5) 完成図

■ 取り外しは逆に送信器を下に押し下げれば外れます。

【ご注意】

ご利用に際しては、以下の点に十分注意願います。

- 本ワイヤレスコールシステムは、ナースコールの代替としての使用は出来ません。
- 受信器と送信器の電波の到達距離は障害物のない場所での水平見通し距離で卓上受信器(ECE1601P)で約40m、携帯型受信器セット(ECE161KP)で約30mです。ご使用になられる環境で電波が確実に届くことを確認して下さい。
- 使用する場合は、ケーブルの断線が無いことを常に確認しながら使用してください。
- 各製品に付属の取扱説明書も必ずお読み下さい。

【製造販売元】

アクセスエール株式会社
〒567-0032

大阪府茨木市西駅前町6-22-301

TEL:072-646-7260、FAX:072-626-1113 E-mail:info@accessyell.co.jp