

入力スイッチ

※他メーカーのスイッチも、ほとんどのものが対応しています

シンプルスイッチーW／シンプルスイッチーN


AYL-FCP021

AYL-FCP022



- 主に手で操作するためのシンプルなスイッチです。操作したときにクリック感があります。
- 手のひらや指で押すだけでなく、つまむ、握る、足を使うなど幅広い使い方ができます。
- 押す時のバネの力の強さが2種類あります。
シンプルスイッチーW …… スプリング弱(白) AYL-FCP021
シンプルスイッチーN …… スプリング並(黒) AYL-FCP022

希望小売価格：4,500円(税抜)
4,950円(税込)

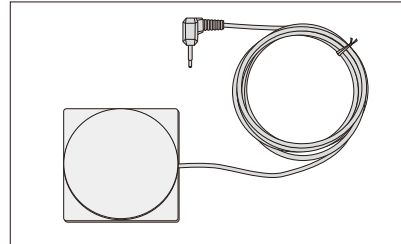


フットスイッチ AYL-FCP023




- 一番シンプルな入力スイッチです。押したときにクリック感があるので、操作感覚を足で感じることができます。
- 上面の前側に傾斜があり、足で踏みやすくなっています。

希望小売価格：4,500円(税抜)
4,950円(税込)

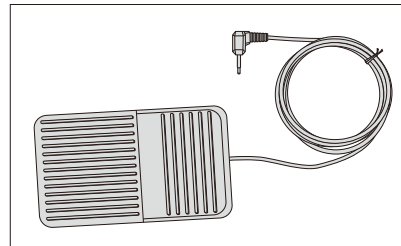


ホッペタッチスイッチT AYL-FCP024

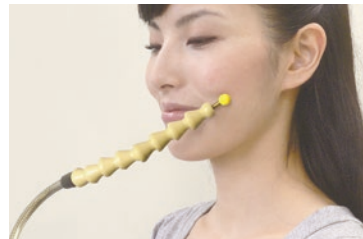

- 金属とプラスチックを組み合わせたアームなので、設置しやすくなっています。
- 先端の丸い部分を前後・左右・上のいずれの方向からでも軽く触れることでスイッチが入ります。
- ほほ、唇、眉などわずかに動く部位で操作可能です。
- 電源不要で移動時や外出時でも使えます。
- 固定用のクリップが付属されているので、取り付けが簡単です。

希望小売価格：10,000円(税抜)
11,000円(税込)

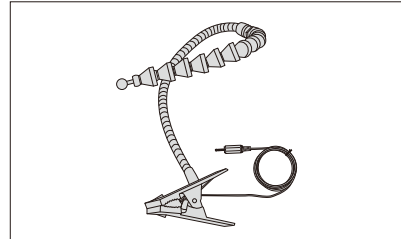

入力スイッチは障害に合わせた様々なタイプのスイッチが用意されています。他メーカーの入力スイッチもお使い頂けます。詳しくは右記のホームページをご覧ください。福祉機器取扱業者へお問い合わせください。

マイスイッチホームページ
<http://myswitch.jp/>



AccessYell アクセスエール株式会社

2022/04

意思伝達装置
カタログ

ファイン・チャット
fine·chat

重度障害者用意思伝達装置

パソコンじゃない、
だからカンタン!



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 呼び出しブザーはナースコールではありません。生命に関わる用途での使用はできません。
- 学習リモコンの信号登録では、安全や生命に関わる機器の登録は行わないでください。

ご購入の前に

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

お取り扱い店

アクセスエール 株式会社

〒567-0032

大阪府茨木市西駅前町6-22-301

TEL. 072-646-7260 FAX. 072-626-1113

ホームページ: <https://accessyell.co.jp/>



このカタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。
本書からの無断の複製はかたくお断りいたします。

スイッチ一つのコミュニケーション




ファイン・チャット

fine·chat

意思伝達装置ファイン・チャットはパソコンではなく、シンプルなシステムでつくられたコミュニケーション装置。

トラブルの少ない安定した動作が可能です。
機器が苦手な
シンプルな機器が良いという方から、
複数の機器を使い分けて様々な事をしたい、
という活動的な方まで、
幅広くご利用いただける機能を
搭載してます。

わたしたちも
使っています。

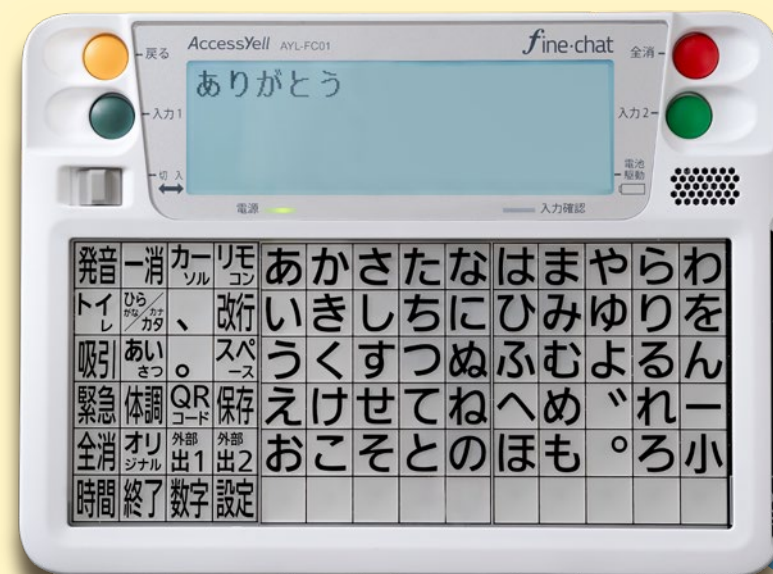

ファイン・チャットの特長


ファイン・チャットは身体状況にあわせた入力スイッチ1つだけですべての操作ができます。
入力スイッチを押すと、本体下部の文字板の文字が順番に点灯します。
入力したい文字が点灯したときに、タイミングをあわせて繰り返し入力スイッチを押すことで文字を選択し、言葉を綴ることができます。
動きがシンプルなので使い方をすぐ覚えることができます。
呼出ブザーや学習リモコン機能、外部機器連携など便利な機能も多数搭載しています。

※1: 入力スイッチ、固定具、ワイヤレスコール、プリンタはすべてオプションです。
※2: 連動させるパソコン、タブレット、スマホ、USBメモリ、家電機器などはご利用者様の方でご準備願います。(機種限定)

意思伝達機能

スイッチ1つで全てを操作

起動から終了までのすべての動作が入力スイッチ1つで可能。
フリーズもまずありません。
すべての動作に音声ガイドがあるので、目が不自由な方でも音声ガイドを頼りに操作ができます。
電源も家庭用コンセント、乾電池、モバイルバッテリーの3方式に対応、外出や入院、災害時の避難時も電源確保が容易です。

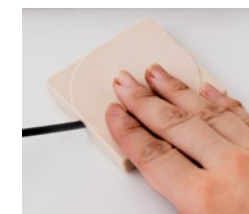

入力スイッチ(オプション)

文章作成と読み上げ機能

スイッチ一つで言葉を綴り、読上げてくれます。
作成した文章はカーソルを操作して修正したり、保存／呼出も可能です。
プリンタでの印刷機能に加え、QRコードに変換して支援者のスマートフォンに文章を取り込むこともできます。

生活支援機能

身の回りの家電の操作

呼出ブザーや家電リモコン機能など生活の質を向上させる機能も搭載。
会話機能と簡単に切り替えながらお使い頂けます。
ご利用者とその支援者の両方に安心をご提供します。



赤外線信号ユニット
(標準付属品)



ワイヤレスコール
(オプション)

外部機器連動機能

メールやインターネットも!

外部機器連携機能を使えば、お持ちのパソコン※、タブレットとケーブル1本で最大2台まで連携できます。
もちろんファイン・チャットとそれらの機器の切り替えも簡単。
ファイン・チャットと連携することでパソコンでトラブルがあったときもファイン・チャットに切り替えてコミュニケーション機能は確保できるので安心です。
※Windowsパソコンでは別途1スイッチ操作支援ソフトが必要です。詳しくは弊社ホームページをご参照下さい。



横平 明奈(よこひら みいな) 様 【脊髄性筋萎縮症(SMA)1型】

4歳のころからレッツ・チャットを利用。ファイン・チャットの発売と同時に購入され、テレビのカラーボタンを学習リモコンに登録、カラーボタンを選んでクイズに答えることもできるようになり、学校生活を楽しんでいます。



内藤 重行(ないとう しげゆき) 様 【脳幹出血】

元気な頃は町内会のお祭りの中心となって頑張るほどでしたが、脳幹出血で寝たきりとなってしまいました。シンプルで使いやすい機器を、とのことでファイン・チャットを導入。奥様との会話や家電製品の操作をして生活しています。



菊池 蒼磨(きくち そうま) 様 【交通事故の後遺症】

8年前に交通事故に遭い重傷となりましたが、長年のリハビリを経てついに入力スイッチの操作ができるようになり、ファイン・チャットの導入に成功しました。導入によって表情に変化がみられ、笑顔が増えたそうです。



宮田 俊也(みやた としや) 様 【脳幹出血】

12年前に脳幹出血で意識不明の状態に。意識が戻ってからわずかに動く指でレッツ・チャットを操作。意識があることが確認できて、リハビリが入るようになって劇的に回復されました。今はファイン・チャットを中心に外部機器連携機能でiPad操作、LINEやインターネットも楽しんでおられます。

ファイン・チャットの基本特長

いつでもどこでも簡単に会話が楽しめます

デザインと使いやすさを両立。
どなたでも安心してお使いいただけます。

電源
家電感覚で「入／切」が可能です。
普段は「入」としておくと、入力スイッチの操作だけでいつでも使い始めることができます。

USB端子
なんでもIRを接続します。

スピーカー端子、イヤホン端子

外部ブザー端子

外部出力端子×2
1スイッチで操作可能なパソコンやタブレットとケーブル1本で連携できます。
1つはマイクロUSBで、パソコン、iPadと直結も可能です。
(制限あり)

入力スイッチ端子×2


本体側入力ボタン
利用者に代わって支援者が操作するボタンです。
● 戻るボタン ● 全消ボタン
● 入力1ボタン ● 入力2ボタン

USB端子
プリンタやUSBメモリを接続します。

スピーカー

液晶画面
選択した文字は液晶画面に順次表示されます。
文字の大きさも大(表示文字数33文字)、中(同52文字)、小(同80文字)と切り替えることができます。


文字板
選択可能枠が順番に赤く光ります。

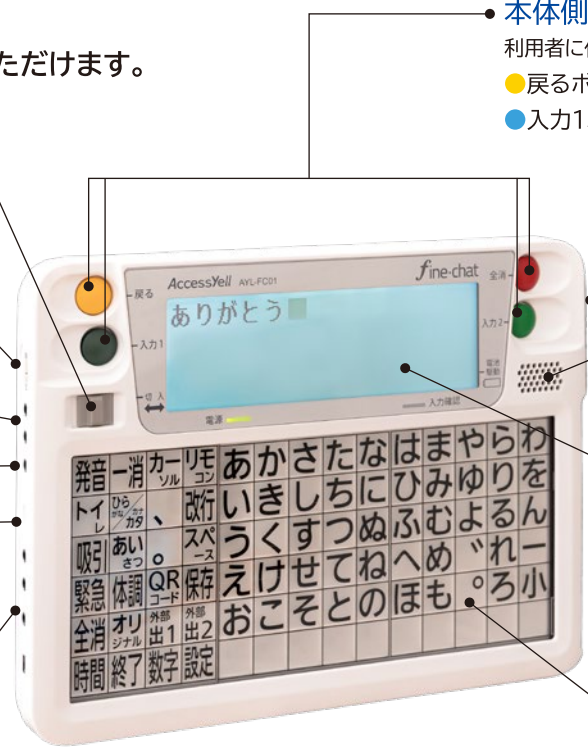

表現豊かな文字板

日常生活に必要な言葉を集めた文字板が4枚ついてます。
入れ替えると豊かな表現の文章を作ることができます。

- 入力方法を工夫することで実際に文字板の交換をしなくても別の文字板の言葉を選ぶことができます。
- カタカナへの切り換えも簡単。
- よく使う言葉を保存できるオリジナル文字板も利用できます。
- オリジナル文字板は選択肢の数を変えたり、イラストを張り付けて使うこともできます。

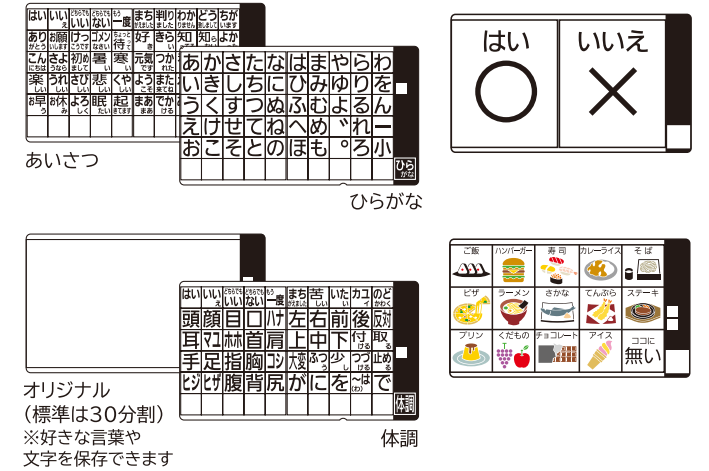

軽くて設置もカンタン

- 生活場面に合わせた設置方法を選べます。
- 小型軽量で持ち運びにも便利。
- 家庭用電源と乾電池の両方に対応しているので、外出先でも手軽に使えます。
- モバイルバッテリーをつなぐこともできます。(機種限定)



呼出ブザーも併用可能

- 入力スイッチを一定時間長押しすると、内蔵の呼出ブザーを鳴らすことができます。
- 1つの入力スイッチで会話と呼出ブザーの2つの機能を使い分けることができ、大変便利です。
- 対応品のワイヤレスコールを接続すれば、同時に離れた場所のコールを鳴らすことができます。



あなたに合った入力スイッチをつなぐだけ

ファイン・チャットは
入力スイッチを接続するだけですぐ使えます。



接続したスイッチで操作します




本体上部のボタンでも操作できます



文字板を直接押して操作することはできません

すぐ覚えられる簡単操作

入力した文字が光っているときに、
入力スイッチを押すだけで文章を作成できます。
すべての動作に音声ガイドがあるので、
視覚障害のある方でもご利用いただけます。

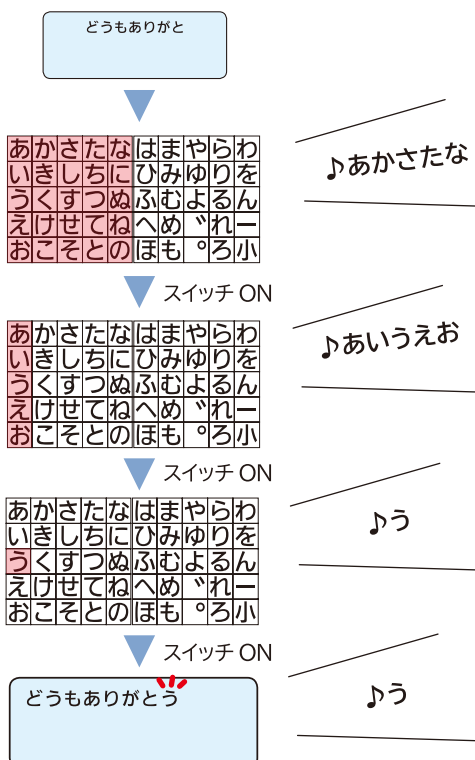

さらに活動の場を拡げたい方のために

身の回りの機器も操作

様々な家電機器を操作できる
高度な環境制御機能(赤外線学習リモコン)を搭載しています。




- 赤外線学習ユニットを使って赤外線リモコンの信号を本機に登録、発信することでテレビ、エアコンをはじめ様々な機器を簡単に操作することができます。
 - 信号は最大60個まで登録できるので、身の回りの多くの機器を操作することが可能です。
 - WiFi通信は不要なので通信トラブルもありません。
- ※操作できる機器は赤外線リモコン機能を搭載しているものに限りです。
※入力スイッチや家電機器は一例です

外部連携機能

コミュニケーションの幅を広げるために
他の機器と連携機能を備えています。


- 作成した文章は読み上げたり印刷に残すだけでなく、その文章のQRコードを表示させることで簡単にスマートフォンに取り込むことができます。
 - 「外部出力」機能を使うことで、本機に接続した入力スイッチ一つで、パソコンやタブレットなど、入力スイッチで操作できる機器を最大2台まで接続できます。
- ※対応するパソコンソフト、タブレットの詳細や、その他必要な部材については弊社ホームページをご参照ください。

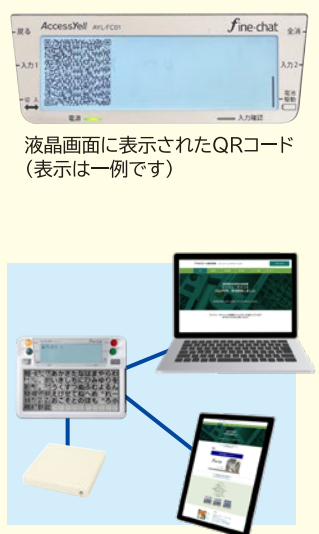

ファイン・チャットの各種仕様

本体

本体希望小売価格 **¥398,000**(非課税、オプション別)

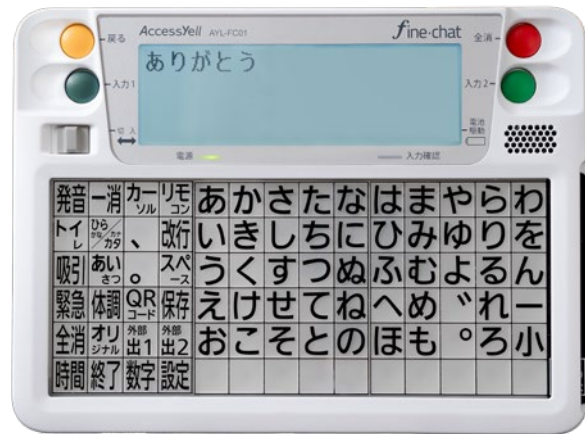

AYL-FC01-S(シルバー)



AYL-FC01-B(ブルー)※限定色



AYL-FC01-P(ピンク)※限定色

オプション(例)



入力スイッチ



固定具



ワイヤレスコール

【購入における給付制度について】

ファイン・チャットを購入いただくにあたり「補装具費支給制度 重度障害者用意思伝達装置」の枠の「**高度な環境制御機能が付加されたもの**」を活用できる場合があります。この制度を活用すれば、本体で45万円までの助成を受けることができます。また、オプション類についても「修理項目」として補助を受けることができます。制度の運用については購入される地域の行政窓口へお問い合わせください。

※制度の詳細については、<「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン>のホームページ(<http://www.resja.or.jp/com-gl/>)をご覧ください

補装具費支給制度を活用して購入する場合、プリンターを本体価格に含めることができます。その際はプリンターの金額を加算した本体価格が設定されます。

項 目	仕 様	
型 番	AYL-FC01-S(シルバー) -B(ブルー) -P(ピンク)	
寸 法	長さ 262mm 幅 30mm 高さ195mm	
質 量	約750g(文字板1枚含む、乾電池含まず)	
入力端子	入力スイッチ	2系統 モノラルミニジャック
	DC入力	DC入力DCジャック(DC5V)
出力端子	スピーカー端子	モノラルミニジャック(0.5W/8Ω)
	イヤホン端子	モノラルミニジャック(40mW/16Ω)
	外部ブザー端子	モノラルミニジャック
	外部出力端子	2系統 マイクロUSB、モノラルミニジャック 各1
	赤外線信号端子	USB端子Aコネクタ
プリンター/USBメモリ	USB端子Aコネクタ	
LCD表示可能文字数	33文字(11文字/行×3行)	
	52文字(13文字/行×4行)	
	80文字(16文字/行×5行)	

【本体同梱品】

AC-USBアダプタ、USB-DCケーブル、文字板(4種類)、ショルダーベルト、取扱説明書、なんでもIR(ファイン・チャット専用)、USBコード(なんでもIR専用)、文字板用シールセット

プリンター(別売)

EP-882AW



●ファイン・チャットをプリンターに接続すれば作成した文章を印刷することができます。

●対応するプリンターはセイコーエプソン製の一部の機種に限定されます。

推奨機種(2021年4月現在)

●EP-883A ●EP-882A ●EP-881A ●EP-052A

●EP-049A 等

(その他、最新の対応機種については弊社HPで確認願います)

ワイヤレスコール


小電力型ワイヤレスコール接点入力送信器 AYL-FCP011



- 付属の専用金具でファイン・チャットの背面のくぼみにセットできます。
- 送信器側面にケーブルの接続口があります。付属のケーブルでファイン・チャットと接続します。
- リチウムイオン電池(CR2×1個、本体に同梱)が必要です。

ご注意: ナースコールではありません。
生命に関わる用途での使用はできません。

希望小売価格: **20,000円**(税抜)
22,000円(税込)

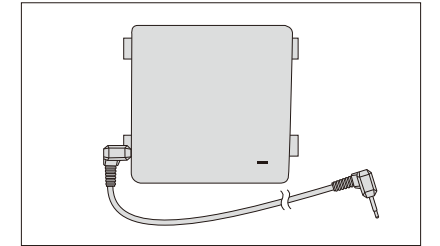


小電力型ワイヤレスコール卓上型受信器 AYL-FCP012



- 電波は見通しで40mまで届きます。
- 音と光で呼び出しをお知らせします。暗いところでも、確認することができます。
- 家庭用コンセントに接続するので電池切れの心配はありません。

希望小売価格: **19,000円**(税抜)
20,900円(税込)

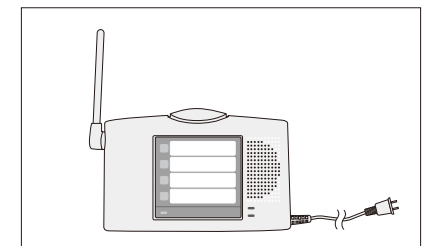


小電力型ワイヤレスコール携帯型受信器セット AYL-FCP013



- 電波は見通しで30mまで届きます。
- 音と振動の両方で呼び出しをお知らせします。
- 小型軽量でポケット等に入れて持ち歩くことができます。


希望小売価格: **29,000円**(税抜)
31,900円(税込)

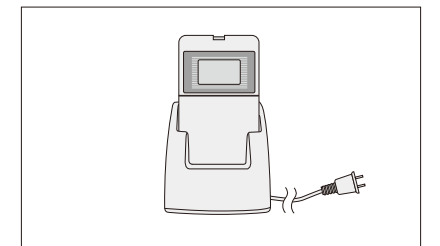

支持具

支持アーム AYL-FCP001


希望小売価格: **30,000円**(税抜) 33,000円(税込)

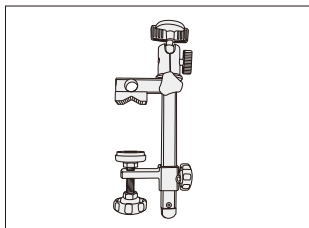

- テーブルやパイプなどにファイン・チャットを固定します。
- ファイン・チャットを自由な角度に調整することができます。
- 厚さ8cm以下のテーブル、直径2cm~8cmのパイプに固定可能です。

フレキシブルアーム AYL-FCP002

希望小売価格: **9,000円**(税抜) 9,900円(税込)

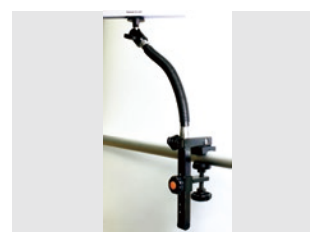


ボールヘッド
(別売、支持アームの
ものを取り付けます)



- 支持アームの先端に取り付け、ファイン・チャットを高い位置に固定できます。
- 延長させた部分(約25cm)は自由に曲げられるので、ファイン・チャットを見やすい位置に固定できます。
- 別途、支持アーム(AYL-FCP001)が必要です。単体では固定できません。

多機能アーム AYL-FCP003


希望小売価格: **45,000円**(税抜) 49,500円(税込)

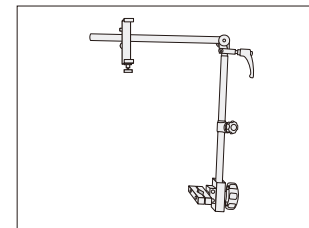

- 車椅子、電動ベッドなどのパイプに取り付けることで、ファイン・チャットを見やすい位置に固定できます。
- 長さや角度を自由に調整できるので、様々な用途でお使いいただけます。
- 直径16mm~25mmのパイプに固定可能です。

スタンドアーム AYL-FCP004

希望小売価格: **50,000円**(税抜) 55,000円(税込)

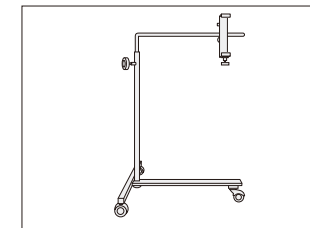

- ベッドの下にスタンドアームの脚が入るので、寝たままの楽な姿勢でファイン・チャットを操作することができます。
- キャスター付きなので、移動や調整が簡単に行えます。
- ファイン・チャットの向きを自由に変わるので、ベッド上でどの方向を向いても、使うことができます。
- ALSなどの難病をはじめ、ベッド上でファイン・チャットを使う時間が多い方には最も適した支持具です。