


スタンドアーム／キャスタータイプ(AYL-FCP004A)の変更点ご紹介

【1】高さ調節機構の改善

従来タイプ

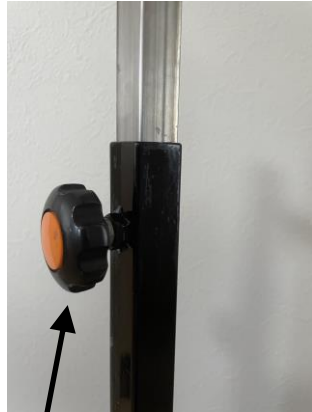

固定ノブのみ

従来の固定部の高さ調整機構は、固定ノブで上下するフレームの穴のところにネジを差し込む形式でした。しかし、これではどこでネジが差し込めるのかを探しながらネジを締める必要があり、手間がかかりました。

そこで今回は「ロックピン+固定ノブ」の組み合わせで、固定できる部分でロックピンがフレームの穴に刺さることで位置決めが簡単になりました。また、ロックピンとノブの2つのロックがかかるため安全性も向上しました。

今回の改善に伴い、以下のように名称、品番、定価を変更しております。

名称:スタンドアーム キャスタータイプ

品番:AYL-FCP004A

定価:¥55,000-(税抜)

出荷開始時期:2023年7月18日

改善タイプ




ロックピン

固定ノブ

【2】「なんでもIR」の取付方法提案

ファイン・チャットでは「なんでもIR」が大きく、特にスタンドアームを使った場合、ベッド周りに適切における場所がないというお声を頂きました。

そこで、スタンドアームの頭頂部にねじ穴を設け、その穴にネジでプレートを固定、さらにその上にマジックテープで「なんでもIR」を固定する方法を提案しました。取付に必要な部材もすべて付属しています。(ネジを締めるプラスドライバーのみ、別途必要)

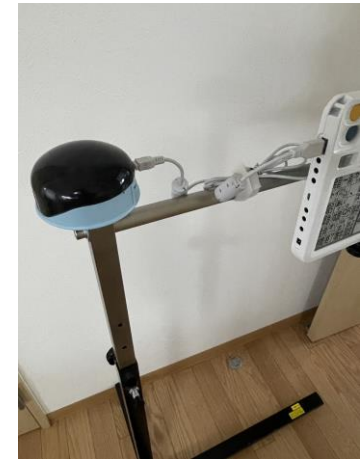

ファイン・チャットと一緒に取り付けられたところ