

【本製品について】本製品の利用には別途、入力スイッチと単3乾電池3本が必要です


- 障害者用の入力スイッチを接続し、音と光で入力スイッチを押したことを知らせてくれます
- 入力スイッチをONにしたタイミングが確実に判るので入力スイッチを上手に押すための練習が出来ます
- 付属のモノラルケーブルをつなげると、同時に接続した機器(呼び出しブザーや意思伝達装置等)を操作できます

【製品外観と製品内容】



製品内容	本体
	モノラルケーブル
	ストラップ
	取扱説明書(本書)

【各部名称と役割】

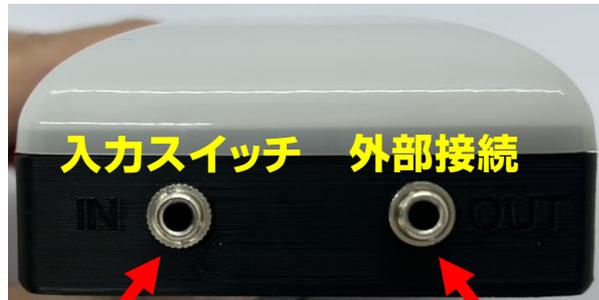

入力スイッチ端子
入力スイッチを接続します
入力スイッチを押すと上部が
光って、ブザーが鳴ります

外部出力端子
入力スイッチで同時に操作
したい機器を接続します



ブザー音の有り/無し
切替スイッチでブザー音の
有り/無しが切り替わります

【設置方法】

平らなところに置いて、またはストラップで吊して使います



(注意)吊して使う場合は落下しないように注意してください

【電池のセット方法】本製品では単3乾電池3本を使用します



- ①本体背面の電池フタのツメを押さえて電池フタを開きます
- ②単3乾電池3本(別売)を「+」「-」の向きに注意してセットします
- ③電池フタをしっかりと閉じます

連続駆動時間はパナソニックのアルカリ乾電池(エボルタ)利用で約18時間です
(利用条件によって変化します)

【使用方法】電池をセットしてある状態から始めます

①入力スイッチ(別売)を接続します



②入力スイッチを押すとLEDが光ってブザーが鳴ります



③側面のスイッチでブザーの音の有り/無しが切り替えられます



④出力端子に接続したモノラルケーブルを呼出ブザーや機器に接続すれば、同時に利用できます




(ご注意)LEDが光らなくなったら乾電池が無くなってきたサインです、早めに新しい乾電池に交換して下さい

【ブザーライトを使った入力スイッチの練習方法】


第1段階 押す、離すができる

体の部位・姿勢、ポジションを調整し確実に押すことができるようになるうまいかない場合はスイッチの見直しも考える

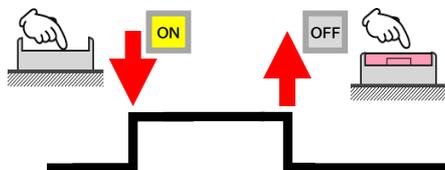


第2段階 タイミングを合わせて押すことができる

掛け声の回数や速さを調整してタイミングよく押せるように練習する同時に、押さずに待つこともできるようになる

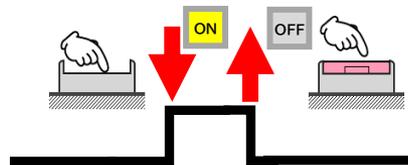

第3段階 選択肢を考えながら押すことができる

選択する場所を考えながら、押す、離すの繰り返しができるようになる

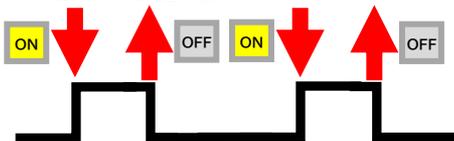

【ご注意】

●本製品の本体は3Dプリンタで作成しているため積層跡があります。また、表面の模様にも多少の個体差がありますが、不良ではありません。●本製品は命に関わる用途に使えません。ナースコール等には接続しないでください。●ブザーは個体差があり、製品毎に音色や音量に多少の差があります。御了承願います。●分解や改造などは行わないで下さい。●使用中に異常を感じた場合はすぐに使用をやめて、他の機器との接続を外し、電池も取り出してから弊社までご連絡願います。●電池の向きは必ず正しくセットしてください。間違えてセットすると、けがや故障の原因となります。●電池は単3アルカリ乾電池を使って下さい。充電電池やマンガン電池では電圧が低く動作しないことがあります。●電池の容量が少なくなるとライトが暗くなる、ブザーの音が小さくなるなどの変化があります。その場合は早めに電池を交換して下さい。●種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。●長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください、液漏れなどにより破損する恐れがあります。●電池のセット・交換の際は、電池をお子様が悪く口に入れないようお子様の手の届かない場所で行って下さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師などに相談してください。●本取扱説明書の指示以外の使用は事故の原因となります。絶対におやめ下さい。●製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

【返品、交換、不具合について】

●お客様のご都合による返品はお受けできません。不具合については初期不良のみ対応しております。商品到着後1週間以内に弊社までご連絡ください。

【製造・販売元】

アクセスエール株式会社

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6-22-301
TEL:072-646-7260 FAX:072-626-1113
E-mail:info@accessyell.co.jp